

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922) 49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58  
Иваново (4932)77-34-06  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Сургут (3462)77-98-35  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольяти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93


Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://asp.nt-rt.ru> || [apu@nt-rt.ru](mailto:apu@nt-rt.ru)

## Стерилизационная система STERRAD 100S

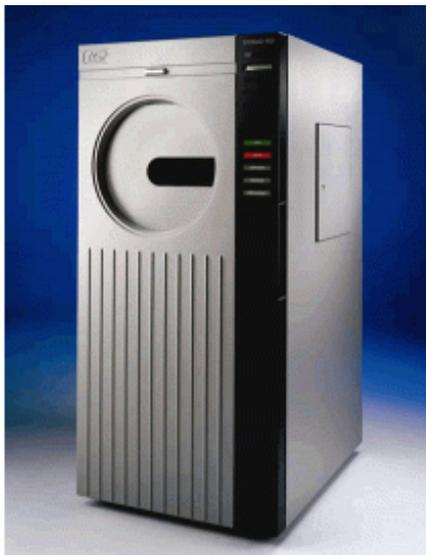

Система STERRAD® 100S – это низкотемпературный стерилизатор, основанный на технологии плазмы пероксида водорода STERRAD®. Предназначена для лечебных учреждений, имеющих потребность в быстрой и бережной стерилизации инструментов и оборудования, особенно высокотехнологичного дорогостоящего инструментария.

Система STERRAD® 100S, купить недорого можно в Волгограде, при достаточно большом объеме загрузки имеет 2 непродолжительных цикла стерилизации (54 минуты - для простых инструментов, 72 минуты - для инструментов с узкими, длинными каналами). Это позволяет проводить 25 циклов стерилизации в сутки, в 25 раз увеличить оборачиваемость инструментов по сравнению с обработкой этиленоксидом.

Система STERRAD® 100S предназначена для стерилизации широкого спектра инструментов, как для общей хирургии, так и высокотехнологичных изделий, чувствительных к воздействию влаги и температуры. Благодаря сухому низкотемпературному процессу, щадящая обработка гарантирует сохранность инструментов, продлевает срок их службы, повышает их оборот, снижает затраты на ремонт и закупку новых инструментов. Изделия стерилизуются в специальной упаковке, что позволяет сохранить их стерильными в течение длительного времени.

Система STERRAD® 100S обеспечивает гарантированный уровень стерильности в соответствии с мировыми стандартами и высокую надежность, благодаря двойному циклу стерилизации и использованию бустеров для стерилизации длинных каналов. Исключен контакт персонала со стерилизующим агентом, поскольку он поставляется в плотно запаянных кассетах и используется автоматически. Отсутствие токсичных отходов и остатков пероксида водорода на поверхности инструментов обеспечивает безопасность медицинского персонала, пациентов и окружающей среды, исключает необходимость в длительной аэрации, что значительно сокращает время обработки инструментов и повышает их оборот. Система удобна в обращении и надежна: микропроцессор автоматически контролирует параметры работы, вся информация о работе стерилизатора выводится на экран и на бумагу, происходит автоматический сброс отработанных кассет в специальную емкость. Процесс стерилизации контролируется показателями на экране, распечаткой по итогам цикла, химическими и биологическими индикаторами. Для установки системы необходимы только пространство около 1 м<sup>2</sup> и источник электропитания, не требует подведения воды, дренажных систем, установки вентиляции и систем дожига газов.

### Преимущества STERRAD® 100S:

- Современная низкотемпературная технология стерилизации и сухой щадящий процесс сохраняют целостность и продлевают срок службы деликатных и чувствительных к влаге инструментов.

- Отсутствие необходимости установки дополнительных дорогостоящих систем, в т.ч. для аэрации и подачи воды, обеспечивает экономию затрат лечебного учреждения на монтаж стерилизационной системы.

- Безопасность для персонала, пациентов и окружающей среды. Продукты распада пероксида водорода после завершения цикла – это незначительное количество воды и кислорода. Пероксид водорода не остается на поверхности инструментов, не оставляет токсичных отходов. Это обеспечивает безопасность медицинского персонала, пациентов и окружающей среды, а так же исключает необходимость в длительной дегазации инструментов, что значительно сокращает время их обработки и повышает их оборот.

- Стерильные упакованные инструменты готовы к использованию или хранению сразу после окончания цикла, не требуются дополнительные условия по их охлаждению или аэрации в течение длительного времени.

- Короткий цикл стерилизации - быстрый оборот инструментов и экономия затрат на приобретение новых.

- Комплексная, оперативная поддержка пользователей специалистами компании Johnson & Johnson - обучение персонала и технический сервис.

## Технические характеристики STERRAD® 100S:

Общее время цикла  
Короткий. . . . . 54 минуты  
Длинный. . . . . 72 минуты  
Температура в цикле. . . . . 45 - 55° С  
Размеры и вес  
Ширина. . . . . 765 мм  
Высота. . . . . 1,660 мм  
Глубина. . . . . 1,020 мм  
Вес. . . . . 350 кг  
Требования к электропитанию  
Электропитание трехфазное  
Напряжение. . . . . 380 В  
Ток. . . . . 10 А  
Частота. . . . . 50 Гц  
Необходимые свободные пространства  
Площадь, занимаемая на полу комнаты. . . . . 87x107 см  
от задней панели. . . . . 5 см  
от боковых и передней панели. . . . . 1 м  
Рабочий доступ. . . . . 1м с каждой стороны  
Встроенные колеса обеспечивают мобильность  
Камера стерилизации  
Форма камеры. . . . . цилиндрическая  
Объем камеры. . . . . 100 л  
2 полки:  
верхняя. . . . . 700 x 425 мм  
нижняя. . . . . 760 мм x 325 мм  
Максимальная нагрузка на 1 полку. . . . . 25 кг.  
Условия рабочего помещения  
Температура . . . . . 10-40° С  
Относительная влажность. . . . . ≤95% (без конденсации)

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922) 49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58  
Иваново (4932)77-34-06  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Россия (495)268-04-70

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Сургут (3462)77-98-35  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Казахстан (772)734-952-31

Тольяти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

<https://asp.nt-rt.ru> || [apu@nt-rt.ru](mailto:apu@nt-rt.ru)